

CRITERES D'ACCEPTATION D'UNE SOUCHE *SALMONELLA* (SOUCHE PURE)

IDENTIFICATION PRECISE de la SOUCHE

+ FICHE D'ENVOI SPECIFIQUE

ETIQUETTE PATIENT avec : NOM / PRENOM
DDN ou MARICULE
Ref interne labo
ou
REF.INTERNE LABO seule



MILIEU DE CULTURE / MILIEU DE TRANSPORT

MILIEUX DE CULTURE

ou

MILIEUX DE TRANSPORT

En tube : -Kligler
-gélose nutritive

e-swab

En boite : -milieu non sélectif :TSA (Trypcase Agar Soja),
gélose au sang.....
-milieu sélectif : Hektoen, XLD.....
-milieu chromogène pour salmonelles



CONDITIONS DE TRANSPORT

EMBALLAGE

TEMPERATURE DE TRANSPORT

1 souche par Sachet

Température ambiante

Sachet avec poche kangourou et papier absorbant
⇒pour les documents associés

Exemples :



Tubes : bien fermés

Boites : fermées par scotch ou parafilm

DELAI ENTRE L'ISOLEMENT DE LA SOUCHE ET LA RECEPTION LABO

12h

24-48h

4 jours

Idéal

Bon

Maximum toléré